




目次

アプリからマッサージチェアを利用する

-  インストール・アカウント作成 > 02
-  Bluetooth で接続 > 03
-  マッサージチェアの登録（初回登録） > 04

アプリでできること・使い方

-  アプリでできること > 05
-  人体マップ > 06
-  ヘルスケア > 07
-  履歴・お気に入り > 08
-  人気ランキング・お試し > 10
-  シーン > 11
-  配信 > 12
-  ライブラリ > 13
-  こだわりセレクト > 14
-  あなたの好みに最適化 > 15
-  その他、メニューについて > 16

↓ インストール

アプリをインストールします。

オンラインヘルプからアクセスするか「App Store」または「Google Play」から「フジ医療器」で検索してください。



オンラインヘルプ

<https://www.fujiiryoki.co.jp/app/help.html>

※対応 OS・対応マッサージチェアはこちらからご確認ください。

👤+ アカウントを作成する



1. アプリを起動し、アカウント作成をタップします。
本アプリの利用規約などが表示されますのでご確認ください。
2. 登録するユーザー情報を入力ください。
入力後、「送信」をタップすると、入力された送付先へ認証コードの記載されたメッセージが送信されます。
3. 記載されている認証コードを入力して、表示されているユーザー情報を入力ください。入力が完了したら、「登録」をタップします。


これで、アカウントの作成は完了です。

※登録されたアカウントは、本アプリの利用にのみ用いられます。

Bluetooth でスマートフォンとマッサージチェアをペアリングする

スマートフォンとマッサージチェアを接続するために、Bluetooth によるペアリングが必要です。

【Android をご利用の方】

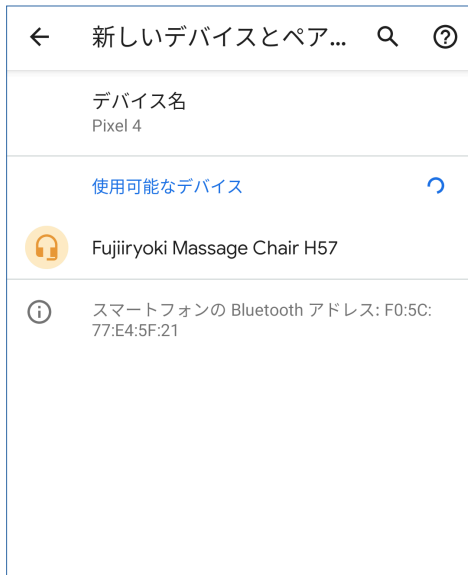

バージョン 12 の場合

1. リモコンからマッサージチェアの電源を入れてペアリング可能な状態にします。
2. スマートフォンのホーム画面から、設定 > 接続済みのデバイスへ移動して、「新しいデバイスとペア設定する」をタップします。
※ Bluetooth がオンに切替わります。


使用可能なデバイス にマッサージチェアが表示されるのでタップします。

(表示例) AS-2100 : Fujiiryoki Massage Chair H57
SKS-H7200 : Massage Chair H22

3. 数秒後に接続が完了します。

※接続中は、リモコン画面の Bluetooth アイコンが青色で表示されます。

【iPhone をご利用の方】

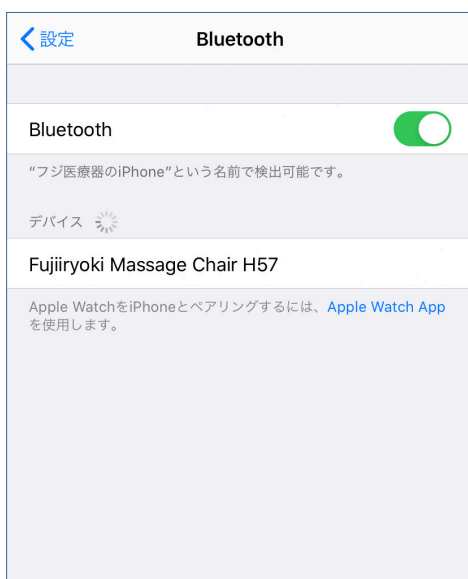

iOS15 の場合

1. リモコンからマッサージチェアの電源を入れてペアリング可能な状態にします。
2. スマートフォンのホーム画面から、設定 > Bluetooth へ移動して、Bluetooth をオンにします。
その他のデバイス にマッサージチェアが表示されるのでタップします。
(表示例) AS-2100 : Fujiiryoki Massage Chair H57
SKS-H7200 : Massage Chair H22
3. 数秒後に接続が完了します。

※接続中は、リモコン画面の Bluetooth アイコンが青色で表示されます。

マッサージチェアの登録 (初回登録)

アプリとマッサージチェアを初めて連携する場合には、ご利用になるマッサージチェアの登録と、マッサージチェアの体型検出機能を用いた体型情報の登録が必要です。

初回登録

1. マッサージチェアとスマートフォンが、Bluetooth で接続中であることを確認ください。

接続中であれば、リモコン画面の  が青色で表示されます。

2. アプリにログインして、機器選択リストからご利用になるマッサージチェアをタップします。

(表示例) AS-2100 : Fujiiryoki Massage Chair H57
SKS-H7200 : Massage Chair H22

3. シリアル番号をカメラで読み込み登録します。シリアル番号は、クイックガイドもしくはマッサージチェアの背面を確認ください。シリアル番号の登録はスキップし、後から登録することも可能です。

4. 左図の画面に移動したらマッサージチェアのリモコンで、App ボタンをタップします。

5. リモコン画面が、体型情報の登録画面になります。画面にしたがって登録を進めてください。

6. 体型情報の登録が完了すると、アプリがホーム画面へ移動します。これで初回登録は完了です。



アプリでできること



★ お気に入り > 08

マッサージの使用履歴からお気に入りを登録

👤 人体マップ > 06

疲労度を分析しておすすめのコースを提案

📊 ヘルスケア > 07

ヘルスケア情報と連携してコースを提案

🕒 履歴 > 08

マッサージの使用履歴を保存・再現

👑 人気ランキング・お試し > 10

全国で人気のコースや、お試しコースを提案

☰ メニュー > 16

体型情報やヘルプなどの確認や設定を行えます。

🏃 あなたの好みに最適化 > 15

使用履歴から、あなたの好みを分析

👉 こだわりセレクト > 14

お好みの力加減へ調節できます。

🎵 ライブラリ > 13

癒しのミュージックライブラリ

⬇️ 配信 > 12

新しいマッサージコースを配信


📄 シーン > 11

利用目的から最適なコースを提案

👤 人体マップ

体の疲れている部位を塗りつぶすことで、体の疲労度を分析。分析結果に基づいて力加減を調節したオススメのマッサージコースを提案します。

人体マップの使い方

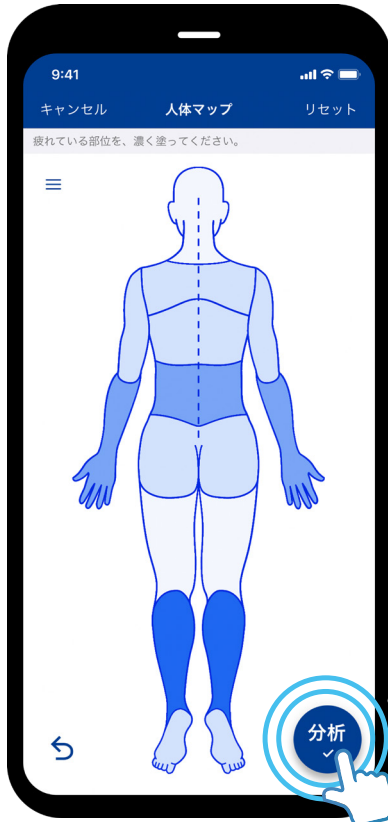

1. 体の疲れている部位を、指で塗りつぶしてください。
とくに疲れている部位は、くり返して塗ることで色が濃くなります。色が濃いほど疲労度が高くなります。(三段階)



操作を一段階戻す。



部位ごとの値を表示する。

2. 塗りつぶしが終わったら、「分析」をタップしてください。
疲労度を分析し、おススメのマッサージコースを提案します。

3. 提案されたマッサージコースを開始する場合は、「マッサージを開始」をタップしてください。

4. マッサージチェアにマッサージコースが転送され、リモコン画面が切替わります。(転送されるマッサージコースは、分析結果に基づいて力加減が調節されています)



リモコン画面の「はい」をタップすると、マッサージが開始されます。

「いいえ」をタップするとメニュー画面に戻ります。

ヘルスケアアプリと連携し、心拍数・歩数・睡眠時間を取得。それらの情報を用いたオススメのマッサージコースを提案します。

Android であれば Google Fit、iOS であればヘルスケアのアプリと連携します。



取得するヘルスケアデータは時間帯によって自動的に変化します

	心拍数	9:00 ~ 18:00
	歩数	18:00 ~ 4:00
	睡眠時間	4:00 ~ 9:00

ヘルスケアアプリの連携方法

1. ホーム画面で、ヘルスケアのエリアをタップします。
2. 連携する項目をオンにして、設定を完了します。

ヘルスケアからマッサージコースを開始する

1. ヘルスケアのエリアをタップします。おすすめのマッサージコースについての概要が表示されます。
2. 「マッサージを開始する」をタップすると、マッサージチェアにマッサージコースが転送され、リモコン画面が切替わります。リモコン画面の「はい」をタップすると、マッサージが開始されます。「いいえ」をタップするとメニュー画面に戻ります。

履歴・お気に入り

アプリとマッサージチェアを接続中（アプリモード中）にご利用になったマッサージコースの履歴を保存します。保存されたマッサージはいつでも再現可能です。気に入った履歴をお気に入りに登録すると、履歴の上限数（20件）をこえて残し続けることが可能です。

※履歴の保存は20件まで・お気に入りの登録は50件まで可能です。

※履歴として保存する情報は、マッサージコース・こだわりセレクトの強弱・体型情報です。

※手動選択コースは履歴に保存されません。



履歴からマッサージを開始する

1. 「履歴」をタップします。使用履歴の一覧が表示されます。
2. 利用したい履歴をタップします。
マッサージコースの概要や、前回の使用時間が表示されます。
3. 「マッサージを開始する」をタップすると、マッサージチェアにマッサージコースが転送され、リモコン画面が切替わります。
リモコン画面の「はい」をタップすると、マッサージが開始されます。
「いいえ」をタップするとメニュー画面に戻ります。




履歴からお気に入りへ登録する

1. お気に入りに登録したい履歴をタップします。
2. 星をタップします。お気に入りに登録されると星が赤く変化します。



お気に入りからマッサージを開始する。

1. ホーム画面右上の星をタップします。お気に入りの一覧が表示されます。
2. 利用したいお気に入りをタップします。
マッサージコースの概要や、前回の使用時間が表示されます。
3. 「マッサージを開始する」をタップすると、マッサージチェアにマッサージコースが転送され、リモコン画面が切替わります。
リモコン画面の「はい」をタップすると、マッサージが開始されます。
「いいえ」をタップするとメニュー画面に戻ります。

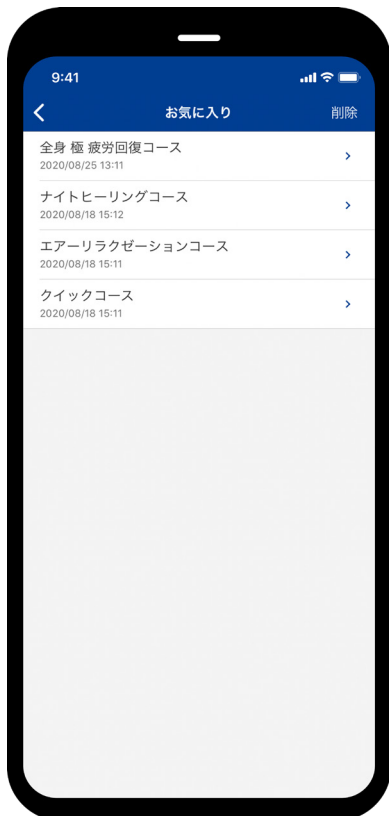

履歴・お気に入りを削除する方法

1. 履歴の場合は履歴一覧を上へスワイプします。お気に入りの場合は画面右上の星をタップして、お気に入りの一覧を表示します。
2. 画面右上に「削除」が表示されますのでタップします。
3. 削除したい履歴を選択し、画面右上のゴミ箱アイコンをタップします。

人気ランキング

全国から人気のマッサージコースを集計し、ランキング形式で表示します。
集計は毎日（AM 3:00）に更新されます。

お試し

ご利用のマッサージチェアの使用履歴から、選択回数の少ない順にマッサージコースを表示します。

普段とは違ったマッサージコースをお試しになりたいときに便利です。



使い方

1. ホーム画面で、「人気ランキング」か「お試し」をタップします。
順位が表示されます。
2. 利用したいマッサージコースをタップします。
3. 「マッサージを開始する」をタップすると、マッサージチェアにマッサージコースが転送され、リモコン画面が切替わります。
リモコン画面の「はい」をタップすると、マッサージが開始されます。
「いいえ」をタップするとメニュー画面に戻ります。

マッサージの利用目的から最適なマッサージコースを表示します。



使い方

1. 「シーン」をタップします。
2. マッサージの利用目的から項目を選択します。
3. 表示されたマッサージコースが、目的にあったマッサージコースです。
「マッサージを開始する」をタップすると、マッサージチェアにマッサージコースが転送され、リモコン画面が切替わります。
リモコン画面の「はい」をタップすると、マッサージが開始されます。
「いいえ」をタップするとメニュー画面に戻ります。




新たなマッサージコース（配信コース）を、ご利用のマッサージチェアにアップロードできます。

※マッサージチェアに保存できる配信コースは一つまでです。

新たな配信コースが転送されると以前の配信コースが上書きされます。

※マッサージチェアに転送されている配信コースは、「チェアに転送されているコース」に表示されます。

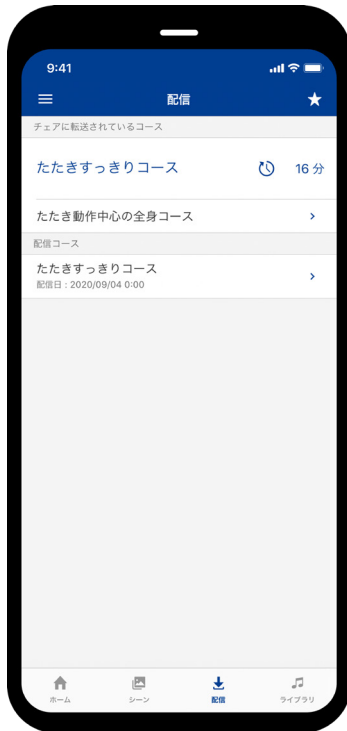

配信コースをマッサージチェアへアップロードして開始する

1. 「配信」をタップしてください。配信コースの一覧が表示されます。
2. 配信コースの一覧からマッサージチェアへアップロードしたい配信コースをタップします。マッサージコースの概要が表示されます。
3. 「マッサージを開始」をタップします。ボタンが「チェアへアップロード」へ変化しますので、タップするとデータが転送されます。

※通信環境によっては数分かかる場合があります。

4. データの転送が完了すると、リモコン画面が切替わります。リモコン画面の「はい」をタップすると、マッサージが開始されます。「いいえ」をタップするとメニュー画面に戻ります。



マッサージチェアのリモコンから、配信コースを開始する

マッサージチェアには、最後に転送された配信コースが1つ保存されています。配信コースが保存されていれば、リモコンから直接操作してマッサージを開始できます。

※チェアに転送された配信コースは、ユーザーモードでも選択可能です。

1. ユーザーモードか、アプリモードのメインメニューを表示してください。
2. 「配信コース」をタップすると、マッサージが開始されます。


🎵 ライブラリ

音楽をダウンロードしてマッサージチェアから再生します。体を包み込むような癒しの音楽がリラックス感たっぷりのマッサージ体験を演出します。




音楽の再生方法

1. 「ライブラリ」をタップします。
2. 再生したいタイトルをタップします。
3. 再生ボタンか、ダウンロードボタンをタップします。
一度ダウンロードすると次回からダウンロードは不要です。

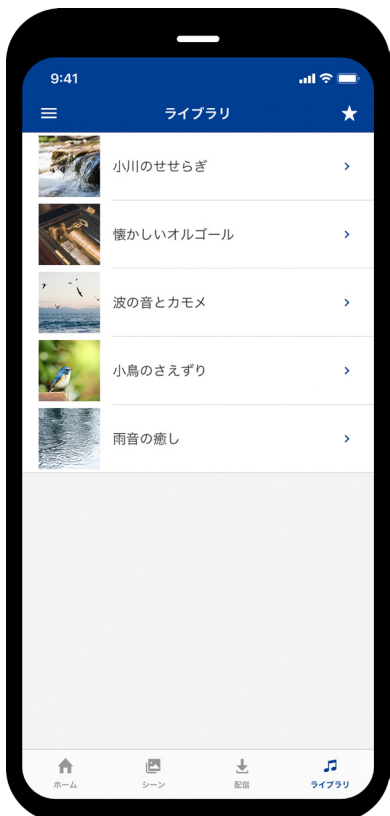

🎵 こだわりセレクト

「強く」や「弱く」など、部位別にマッサージの好みを調節することで、調節値がマッサージに反映されます。使用履歴にも保存され、強弱の好みを分析することが可能になります。

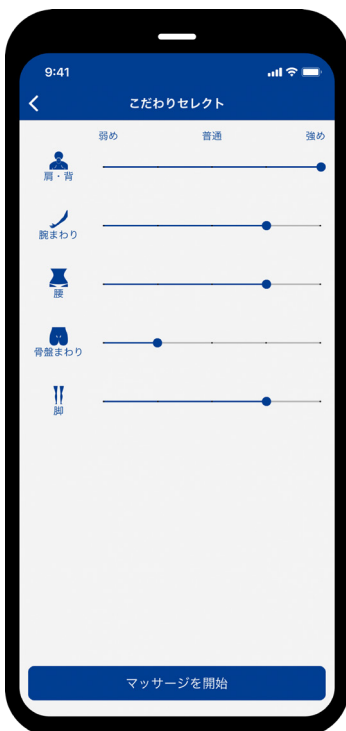

使い方

1. シーンや人気ランキングなどからマッサージコースを開始する前に、「こだわりセレクト」をタップします。

※人体マップ・配信コースなど、こだわりセレクトに対応していない機能では、こだわりセレクトのボタンが表示されません。

2. お好みで部位ごとに強め・弱めを調節します。(5段階)
3. 「マッサージを開始する」をタップすると、マッサージチェアにマッサージコースが転送され、リモコン画面が切替わります。リモコン画面の「はい」をタップすると、マッサージが開始されます。「いいえ」をタップするとメニュー画面に戻ります。

さらに調節とは

履歴やお気に入りには、こだわりセレクトの情報も保存されており、前回の調節値が反映されています。

「さらに調節」をタップすることで、前回の値に調節を加えることができます。

あなたの好みに最適化

マッサージチェアの使用履歴から、お好みで調節されたマッサージの強弱傾向を分析します。その分析結果をもとに、日々のマッサージに用いる体型情報を好みに合わせた情報へと最適化します。



使い方

1. ホーム画面左上のメニューから「体型情報」をタップします。現在の背筋ラインと、好みに最適化された背筋ラインが表示されます。

※ エアーバッグをタップすると、各部位のエアーバッグのレベルを確認できます。

2. 最適化する場合は「好みを分析して最適化」をタップすると、体型情報が最適化されます。

※ 最適化の自動更新をオンにすると、アプリに履歴が保存される度に最適化を自動的に行います。



≡ その他、メニューについて



登録機器情報

マッサージチェアの型番、ファームウェアのバージョンの確認や、シリアル番号の登録ができます。

アカウント情報

メールアドレスやパスワード、身長や体重などのアカウント情報の変更や、アカウントの削除ができます。

ヘルプ

マッサージチェアの取扱説明書や、サポートへの問い合わせなどのリンクが表示されます。

ログアウト

ログアウトして、ログイン画面へ移動します。

アプリ情報

アプリのバージョンなどの情報を確認できます。



オンラインヘルプ

<https://www.fujiiyoki.co.jp/app/help.html>



BLUETOOTH® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、株式会社フジ医療器はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標および商号は、それぞれの所有者に帰属します。